




GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road
Lancaster,
LA1 3PE
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1524 847600
Email: gvsuk@gvs.com

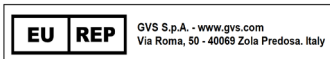

GVS S.p.A. - www.gvs.com
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa, Italy



Instructions For Use; Mode d'emploi; Gebrauchsanweisung; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Gebruiksaanwijzing; Instruções de Utilização; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Instrukcja użytkowania; Инструкцију за употреба; Upute za upotrebu; Návod k použití; Kasutusjuhend; Οδηγίες χρήσης; Használati útmutató; Treoracha Úsáide; Lietošanas instrukcija; Naudojimo instrukcijos; Istruzioni d'uso; Instrucțiunile de utilizare; Návod na použitie; Navodila za uporabo.

REF	2800/R1XXXX Spiroguard Re-usable	2800/R2XXXX Spiroguard Re-usable	2800/R3XXXX Spiroguard Re-usable
Product Code; Code du produit; Artikelnummer; Codice prodotto; Código de producto; Productcode; Código de produto; Produktkod; Produktkode; Produktkode; Tuotekoodi; Kod produktu; Код на продукта; Šifra proizvoda; Kód výrobku; Toote kood; Κωδικός προϊόντος; Termékkód; Cód Táirge; Izstrādājuma kods; Gaminio kodas; Kodíci tal-prodott; Cod produs; Kód výrobku; Koda izdelka.			
Product description; Description du produit; Produktbeschreibung; Descrizione prodotto; Descripción de producto; Productomschrijving; Descrição do produto; Produktbeskrivning; Produktbeskrivelse; Produktbeskrivelse; Tuotteen kuvaus; Opis produktu; Описание на продукта; Opis proizvoda; Popis výrobku; Tootekirjeldus; Περιγραφή προϊόντος; Termékleírás; Tuairisc ar Tháirge; Izstrādājuma apraksts; Gaminio aprašymas; Deskrizzjoni tal-prodott; Descrìerea produsului; Popis výrobku; Opis izdelka. Spiroguard Herbruikbaar; Spiroguard réutilisable; Wiederverwendbarer Spiroguard; Filtro Spiroguard riutilizzabile; Spiroguard, til flergangsbrug; Spiroguard επαναχρησιμοποιήσιμο; Spiroguard reutilizable; Spiroguard reutilizable; Uudelleenkäytettävä Spiroguard; Spiroguard återanvändbar; Spiroguard pro opakované použití; Spiroguard korduskasutatav; Spiroguard újahasználható; Spiroguard, atkārtoti izmantojams; „Spiroguard“ daugkartinio naudojimo; Spiroguard Riutilizzabili; Spiroguard wielokrotnego użytku; Spiroguard na opakované použitie; Spiroguard za večkratno uporabo; Spiroguard за многократна употреба; Spiroguard Ath-inúsáidte; Spiroguard reutilizabil; Višekratni Spiroguard; Spiroguard Gjenbrukbar.	Inlet/Outlet Connectors: - OD 34.0mm / ID 30.1mm - Machine Side; - OD 29.22mm / ID 26.14mm - Patient Side. Approx. dimensions: 96.7mm diameter x 79mm height. Weight: 37g (approx.).	Inlet/Outlet Connectors: - OD 34mm / ID 28.2mm - Machine Side; - OD 29.2mm / ID 26.7mm - Patient Side. Approx. dimensions: 97mm diameter x 79mm height. Weight: 37g (approx.).	Inlet/Outlet Connectors: - OD 34mm / ID 30.1mm - Machine Side; - OD 29.22mm / ID 26.14mm - Patient Side. Approx. dimensions: 96.7mm diameter x 79.2mm height. Weight: 37gm (approx.).
Patient population; Population de patients; Patientenpopulation; Popolazione di pazienti; Población de pacientes; Patiëntenpopulatie; População de doentes; Patientpopulation; Patientpopulation; Pasientpopulasjon; Potilasryhmä; Populacja pacjentów; Πονυλαρία πακίεντι; Populacja pacjenata; Populace pacientů; Pati-siendi populatsioon; Πληθυσμός ασθενών; Betegpopuláció; Daonra na n-othar; Pacientu populacija; Pacientu populacija; Popolazzjoni ta' pazjenti; Populația de pacienți; Pacientov; Populacija bolnikov.	Adult and small adult; adulte et petit adulte; Erwachsene und Kleiner Erwachsener; Adulto e Piccolo adulto; Adulto y Adulto pequeño; Volwassene en Kleine volwassene; Adulto e Pequeno adulto; Vuxen och Liten vuxen; Voksen og Lille voksen; Voksen og Liten voksen; Aikuinen ja Pieni aikuinen; dorosły i mala osoba dorosła; Възрастен и Малък възрастен; odrasla osoba i mala odrasla osoba; dospělý a malý dospělý; täiskasvanu ja väike täiskasvanu; Ενήλικος και Μικρός ενήλικος; felnőtt és kis felnőtt; duine fásta agus duine fásta beag; pieaugušais un mazs pieaugušais; suaugęs ir mažas suaugęs; adulti u adult žgħir; adult și adult mic; dospělý a malá dospělá osoba; odrasla oseba in majhna odrasla oseba.		
 Product supplied non sterile; Produit livré non stérile; Das Produkt wird nicht steril geliefert; Prodotto non sterile; Productum suministrado sin esterilizar; Product niet-steriel aangeleverd; Produto fornecido não-estéril; Produkten levereras ej steril; Produkt leveret ikke-sterilt; Produkt leveret ikke-sterilt; Tuote toimitetaan ei-steriilinä; Produkt dostarczany w stanie niejałowym; Produktът се доставя нестерилилен; Proizvod isporučen nesterilan; Výrobek je dodáván v nesterilním stavu; Toode tarnitakse mittesteriilsena; Το προϊόν παρέχεται μη στείρο; A termék nem sterilen szállítva; Soláthraítear an táirge neamhsteriúil; Izstrādājums piegādāts nesterils; Gaminys tiekiamas nesterilus; Produktu fornūt mīxus sterili; Produs furnizat nesteril; Výrobok sa dodáva v nesterilnom stave; Izdelek je dobavljen nesteriliziran.	Yes; Oui; Ja; Si; Si; Ja; Sim; Ja; Ja; Ja; Joo; Tak; Да; Da; Ano; Jah; Nai; Igen; Tá; Já; Taip; Iva; Da; Áno; Da.		
Temperature during storage; Température de stockage; Temperatur bei Lagerung; Temperatura durante l'immagazzinamento; Temperatura durante el almacenamiento; Temperatuur tijdens opslag; Temperatura em armazenamento; Temperatur under förvaring; Temperatur under opbevaring; Temperatur under oppbevaring; Lämpötila varastoinnin aikana; Temperatura podczas składowania; Temperatura по време на съхранение; Temperatura tijekom skladištenja; Teplota během skladování; Temperatuur ladustamise ajal; Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση; Hőmérséklet tárolás közben; Teocht le linn na stórála; Temperatura uzglabāšanas laikā; Temperatura sandėliavimo metu; Temperatura waqt il-hażna; Temperatura în timpul depozitării; Teplota počas skladovania; Temperatura med skladištenjem.	5 to 40 °C (41-104 °F)		
Internal Volume; Volume interne; Innenvolumen; Volumen interno; Volume interno; Intern volume; Volume interno; Innenvolum; Internt volumen; Indre volum; Sisätalavuus; Objętość wewnętrzna; Вътрешен обем; Unutamji volumen; Vnitřní svazek; Sisemine maht; Εσωτερικός όγκος; Belső kötet; Imleabhar Innheánach; Iekšējais tilpums; Vidinis tūris; Volum Intern; Volum intern; Vnútný objem; Notranja glasnost.	72ml	76ml	73ml
Housing; Boîtier; Gehäuse; Alloggiamento; Carcasa; Behuizing; Estrutura; Kabinet; Hus; Hus; Pidike; Obudowa; Корпус; Kučšte; Kryt; Ümbris; Περιβλήμα; Burkolat; Tithocht; Mäjkj; Büstas; Djar; Carcasă; Kryt; Ohišje.	HIPS	HIPS	HIPS
Filter Media; Matière du filtre; Filter-Medium; Materiale del filtro; Filtro; Filter medium; Material do filtro; Filtermaterial; Filtermateriale; Filtermedium; Suodatimen väliaine; Medium filtruace; Филтраща среда; Filtarski medij; Filtrační prostředi; Filter; Μέσα διήθησης; Szűrőközeg; Meán Scagaire; Filtrét multividi; Filtruoti laikmena; Ifiltra I-Midja; Medii de filtrare; Filtračné médium; Filtrirni medij.	N/A	N/A	N/A